

설명

SyvekNT[®]는 미세조류로부터 분리된 셀룰로오스 중합체의 부드러운 백색 멸균 부직포 패드로서(poly-N-acetylglucosamine), 의료용 포움 뒤판에 부착되어 있습니다.

주의사항

SyvekNT[®] 사용에 대해 알려진 금기 사항은 없습니다. 고혈압성 또는 비만 환자의 경우 압박 시간이 더 길어야 할 수 있습니다.

주의: 연방(미국) 법에 따라 본 장치는 의사 또는 그 외 면허를 받은 의료인이 판매하거나 또는 그의 주문에 따라서만 판매할 수 있습니다.
일회용입니다.

STERILE R

EC REP

EMERGO EUROPE
Pinssegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

CE
0459



Marine Polymer
Technologies, Inc.
159 Lorum St.
Tewksbury, MA 01876-1716
1-888-666-2560

적응증

SyvekNT[®]는 의료 전문인의 지시에 따라서 사용해야 합니다.

SyvekNT[®]는 혈액투석 중인 환자 및 항응고 치료를 받는 환자의 출혈이 신속히 억제되도록 촉진 작용을 합니다.

SyvekNT[®]는 혈관 통로 부위 및 경피 카테터나 튜브 및 외과적 죽은 조직 제거와 같은 출혈상의 국소 관리에 사용됩니다.

MPT MARINE POLYMER
TECHNOLOGIES

혁신적 의학 솔루션

159 Lorum St., Tewksbury, MA 01876-1716

1-888-666-2560

MPS 500-17 rev 12 05/2018

미국산



REF 400-09

3cm x 3cm

심장 도관 삽입 시술 후 사용
방법

심장 도관 삽입 시술 후 사용 방법

사용법:

1. SyvekNT® 파우치를 열고 제품을 무균 영역으로 이동시킵니다.
2. 천자 부위 중심부에 대해 밀폐압을 유지하고 유도관을 제거합니다.
3. 부위에서 혈액이 1~2 방울 나오게 합니다.
4. 즉시 SyvekNT®(Syvek® 쪽을 아래로)를 천자 부위에 놓고 근위압을 계속 유지하면서 SyvekNT®의 포움 쪽에 대해 단단히 압력을 유지합니다.
5. 천자 부위에 대해 단단히 압력을 계속 가하면서 4~6분(진단 절차의 경우 3~4분) 후에 근위 압력의 양을 서서히 줄입니다.
6. 지혈이 이루어질 때까지 천자 부위에 대해 단단히 압력을 유지한 후에 서서히 해제합니다.
7. SyvekNT®를 건드리지 않으면서 부위에 접근하여 투명 드레싱으로 덮습니다.

24시간 후에 SyvekNT®를 제거합니다:

1. SyvekNT®를 물로 적십니다.
2. SyvekNT®를 부드럽게 벗겨냅니다.

천연 고무 라텍스로 제작되지 않음



특허:

7,041,657; 7,115,588; 7,931,637; 8,152,750;
8,481,512; 8,834,516; 8,835,408; 8,859,528;
8,992,453