

제거 방법:

24시간 이내에 GlykoSL®을 물로 적셔서 부드럽게 제거하십시오.

통제된 실온(15°C~30°C, 59°F~86°F)에 보관하십시오.

방사선으로 살균 처리.

재멸균하거나 재사용하지 마십시오.

일회용입니다.

천연 고무 라텍스로 제작되지 않음



EUROPE
Prinsengracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands



0459



**Marine Polymer
Technologies, Inc.**
159 Lorum St.
Tewksbury, MA 01876-1716
1-888-666-2560

GlykoSL®

REF400-13

MPT MARINE POLYMER
TECHNOLOGIES

혁신적 의학 솔루션

159 Lorum St.

Tewksbury, MA 01876-1716

1-888-666-2560

MPS 500-28 rev 06 05/2018

미국산



주의: 연방(미국) 법에 따라 본 장치는 의사 또는 그 외 면허를 받은 의료인이 판매하거나 또는 그의 주문에 따라서만 판매할 수 있습니다.

설명:

GlykoSL[®]은 순응성이 있고 부드러운 흡수성 알긴산칼슘 드레싱으로, 포움 뒤판에 부착되어 있습니다.

적응증:

GlykoSL[®]은 혈관 통로 부위 및 경피 카테터나 튜브와 같은 출혈상의 국소 관리에 사용됩니다.

주의사항:

GlykoSL[®] 사용에 대해 알려진 금기 사항은 없습니다.
고혈압성 또는 비만 환자의 경우 압박 시간이 더 길어야 할 수 있습니다.

사용 방법:

1. GlykoSL[®]를 열어 무균 영역 내에 놓습니다.
2. 천자 부위 중심부에 대해 압력을 유지합니다.
3. GlykoSL[®]을 **매끄러운 쪽이 피부에 단지 않도록 천자 부위 위에 놓습니다.**
4. 천자 부위 위에 단단히 압박을 가하고 3~4 분 후에 근위 압력을 해제합니다.
5. 지혈이 이루어질 때까지 천자 부위에 대한 압력을 유지한 후에 서서히 해제합니다.
6. GlykoSL[®] 위에 마른 거즈를 놓고 투명한 드레싱으로 덮습니다.

